

OML LINQ™: Addendum voor artsen en therapeuten

De OML LINQ™ heeft nog andere functies die niet worden besproken in de OML LINQ™: Gebruikershandleiding.

Er kunnen twee voetschakelaars worden gebruikt in combinatie met de OML LINQ™. Die voetschakelaars werken echter niet onafhankelijk van elkaar. Deze configuratie kan worden gebruikt om de activeringsregeling voor trappenlopen of hardlopen/joggen te verbeteren. Hierbij wordt een voetschakelaar onder de hiel van de gebruiker geplaatst en nog een voetschakelaar onder het eerste caput metatarsale van de gebruiker. Wanneer de instelling HEEL RISE (hielheffing) is geselecteerd op de stimulator, doet de activeringsgebeurtenis zich voor bij teen los (beide voetschakelaars van de grond) en bij hielcontact (eerste voetschakelaar die de grond raakt). Daardoor wordt het inzetten van de stimulatie uitgesteld (in vergelijking met één onder de hiel geplaatste voetschakelaar), wat toegenomen sloffen kan veroorzaken. Het kan nodig zijn om de timingparameter RISING RAMP (aanlooptijd omhoog) op de stimulator te verlagen om dat te corrigeren. Zie ommezijde voor een visuele beschrijving van de werking met dubbele voetschakelaar.


Zie de knowledgebase op de website van Odstock Medical Limited voor meer informatie en scenario's.

De OML LINQ™ kan met andere schakelaartypen worden gebruikt.
Neem contact op met Odstock Medical Limited voor meer informatie.



www.odstockmedical.com

OML LINQ™: Addendum voor artsen en therapeuten

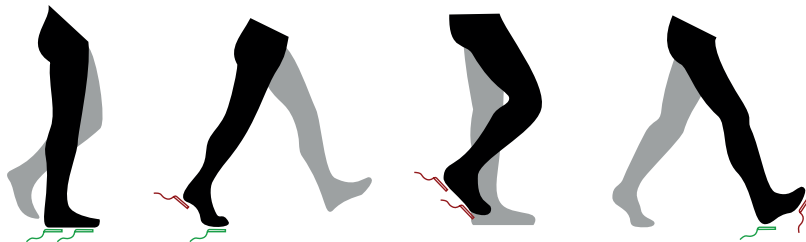

Stimulatie:

Uit

Uit

Aan

Uit

Onderdeelnummer: 11-003-0044

Addendum voor artsen/therapeuten,

Nederlands, LINQ

Herziening: V2.0

© Odstock Medical Limited 2019



+44 (0)1722 439540



+44 (0)1722 425263



www.odstockmedical.com



enquiries@odstockmedical.com



Odstock Medical Limited

National Clinical FES Centre

Salisbury District Hospital

Salisbury, Wiltshire

United Kingdom

SP2 8BJ



www.odstockmedical.com