

OML LINQ™: Zusatzkarte für Therapeuten

Der OML LINQ™ verfügt über Funktionen, die über die im OML LINQ™- Benutzerhandbuch erläuterten, hinausgehen.

Mit dem OML LINQ™ können zwei Fußschalter verwendet werden. Diese Fußschalter funktionieren jedoch nicht unabhängig voneinander. Diese Einstellung kann verwendet werden, um die Auslösungssteuerung zum Treppensteigen oder zum Joggen/Laufen zu verbessern. Dabei wird ein Fußschalter unter der Ferse des Benutzers und ein weiterer unter seinem ersten Mittelfußknochen platziert. Wenn die Einstellung FERSE ANHEBEN am Stimulator ausgewählt ist, tritt das Auslöseereignis beim Abheben der Zehen (beide Fußschalter weg vom Boden) und beim Absetzen der Ferse (erster Fußschalter trifft auf dem Boden auf) ein. Dadurch wird der Start der Stimulation verzögert (im Vergleich zur Situation mit einem einzelnen Fußschalter unter der Ferse), was die Abnutzung erhöhen kann. Es kann erforderlich sein, den Timing-Parameter ANSTIEGS RAMPE am Stimulator zu verringern, um dies zu kompensieren. Vgl. die schematische Darstellung des Betriebs zweier Fußschalter auf der nächsten Seite.


Weitere Informationen und Szenarien finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Website von Odstock Medical Limited.

Der OML LINQ™ kann mit anderen Schaltertypen betrieben werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von Odstock Medical Limited.



www.odstockmedical.com

OML LINQ™: Zusatzkarte für Therapeuten

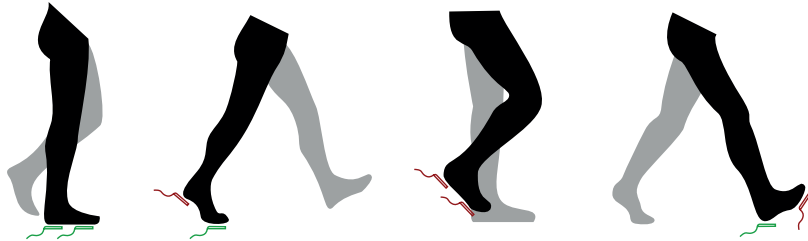

Stimulation:

Aus

Aus

Ein

Aus

Teilenummer: 11-003-0041

Therapeuten Addendum, Deutsch, LINQ

Revision: V2.0

© Odstock Medical Limited 2019



+44 (0)1722 439540



+44 (0)1722 425263



www.odstockmedical.com



enquiries@odstockmedical.com



Odstock Medical Limited
National Clinical FES Centre
Salisbury District Hospital
Salisbury, Wiltshire
United Kingdom
SP2 8BJ

www.odstockmedical.com