

OML LINQ™: Tillæg til klinikere

OML LINQ™ har ekstra funktioner udover de funktioner, der er angivet i OML LINQ™: Brugervejledning.

Der kan bruges to fodkontakter sammen med OML LINQ™, men de to fodkontakter fungerer ikke uafhængigt af hinanden. Denne opsætning kan bruges til at forbedre aktivering i forbindelse med trapper eller løb/jogging. Der placeres en fodkontakt under brugerens hæl og yderligere en fodkontakt under hovedet af første metatarsknogle. Når indstillingen HEEL RISE (hælløft) er valgt på stimulatoren, vil aktiveringen ske ved tåafsæt (begge fodkontakter hævet over jorden) og afbrydes ved hælnedslag (første fodkontakt, der rammer jorden). Det vil forsinke aktivering af stimuleringsstart (sammenlignet med en enkelt fodkontakt placeret under hælen), hvilket kan resultere i, at foden ikke løftes på det ønskede tidspunkt. Det kan derfor være nødvendigt at reducere tidsparameteren RISING RAMP (stigende rampe) på stimulatoren for at kompensere for dette. Se bagsiden for en visuel beskrivelse af funktionen med dobbelt fodkontakt.


Se vidensdatabasen på Odstock Medical Limiteds websted for yderligere oplysninger og scenarier.

OML LINQ™ kan anvendes sammen med andre kontakttyper.
Kontakt Odstock Medical Limited for at få yderligere oplysninger.



www.odstockmedical.com

OML LINQ™: Tillæg til klinikere

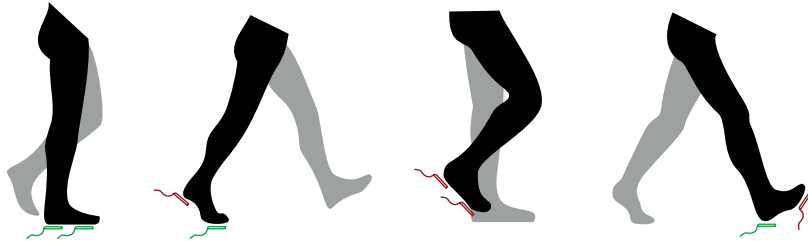

Stimulering:

Fra

Fra

Til

Fra

Varenr. 11-003-0043

Clinician Addendum, Danish, LINQ

Revision: V3.0

© Odstock Medical Limited 2022



+44 (0)1722 439540



www.odstockmedical.com



enquiries@odstockmedical.com



Odstock Medical Limited

National Clinical FES Centre

Salisbury District Hospital

Salisbury, Wiltshire

United Kingdom

SP2 8BJ

www.odstockmedical.com